

NÁVOD:

NASOFARYNGEÁLNÍ VÝTĚR

SPADIA

SPADIA LAB, a.s.

ODDĚLENÍ MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÝCH METOD

Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava Poruba

Tel: 595 539 125 - 127 email: info@spadia.cz

Odběrová souprava PCR pro nasofaryngeální výtěr obsahuje odběrovou zkumavku s médiem + odběrový tampon nasofaryngeální flexibilní (tenký).

Postup:

- Před odběrem je vhodné se pacienta dotázat na pocit ucpaného nosu, odebírat z nosního průduchu, který pacient vnímá jako lépe průchodný.
 - Nezaklánět hlavu.
 - Výtěr z nasopharynxu je nejlépe provést ráno nalačno nebo před odběrem nejíst, nepít, nekouřit, nečistit si zuby. Pacienta necháme před odběrem zakašlat.
 - Tampon jemně zasouváme přes nosní průduch těsně podél nosní přepážky, po spodní stěně nosní dutiny až k zadní stěně nasofaryngu (přibližně 8 - 10 cm v závislosti na věku pacienta). Několikrát jemně pootočíme a tampon vytáhneme.
 - Tampon s materiálem asepticky vložíme do zkumavky s transportním médiem a zalomíme aplikátor v lámacím bodě, který je barevně označen. Zkumavku s tamponem pečlivě uzavřeme.
-
- U dětí je nutná fixace hlavy, odběr je velmi nepříjemný.
 - **Po odběru je nutno vzorek co nejdříve odeslat do laboratoře.**



Odběrová souprava PCR

Transport:

V den odběru je možný transport vzorku při pokojové teplotě.

Od druhého dne až do doby transportu je třeba vzorek skladovat v lednici a následně transportovat při teplotě 2 - 8 °C.

